

機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード 35562010


誘導コード KP-3xx シリーズ

【禁忌・禁止】

- ・MRI でのご使用はできません。[誘導起電力による局所的な発熱で被検者が火傷を負うことがあります。]

【形状・構造等】

形状

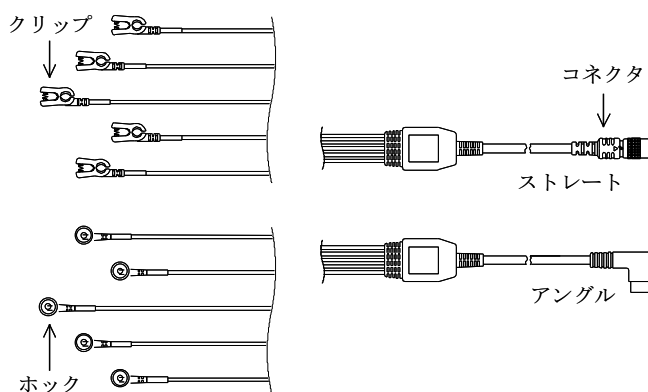

分類

**型名	コネクタ形状	電極側形状	接続可能機器
KP-301S-04	ストレート	ホック	QR-1200
KP-317	ストレート	クリップ	QR-1300
KP-301S-11	アングル	ホック	QR2100
KP-320	アングル	クリップ	QR2500
* KP-327	アングル	クリップ	
KP-324	アングル	クリップ	
KP-325	アングル	クリップ	
KP-326	アングル	ホック	

**型名の枝番(例: KP-320-XX)によりケーブル長が標準品と異なる仕様がある。

【使用目的、効能又は効果】

患者の心電図信号を心電計 (ECG) に伝達する装置です。本品はあるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付けます。

【品目仕様等】

項目	仕様
導通抵抗	5Ω以下
絶縁抵抗	DC1000V、100MΩ以上

【操作方法又は使用方法等】

- ・被検者に電極を取り付け、本品のクリップまたはホックで、電極ホックの凸部をはさみます。
- ・本品のコネクタを、長時間心電用データレコーダ (ホルタ心電計) の患者入力コネクタに接続します。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・指定の機器以外への接続は、行わないでください。[重大な事故の原因となることがあります。]
- ・改造は、絶対に行わないでください。[重大な事故の原因となることがあります。]
- ・本品をホルタ記録器から外すときは、コードを持たずにコネクタを持って引き抜いてください。[断線の恐れがあります。]

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないでください。

使用温度 10~40℃

使用湿度 25~95%

【保守・点検に係る事項】

使用後は、中性洗剤または70%イソプロピルアルコールで清拭してください。

【包装】

1個/1梱包

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

フタミ・エム・イー工業株式会社

〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平 1-46-3

製造業者

フタミ・エム・イー工業株式会社

連絡先

フクダ エム・イー工業株式会社 千葉事業所

千葉県流山市南流山 6-26-8

電話番号 04-7158-9011 (代表)